

## GENERAL GUIDELINES FOR USE:

# Easy Screen™

CLEANING WIPE




**1.** Always dispense wipe through lid. Find center of wipe roll, twist corner of wipe into a point and thread through the hole in the canister lid. Pull through about one inch. Replace lid.

*Siempre dispense limpian por la tapa. Quite la tapa, retire el sello interno y deséchelo. Localice el centro del rollo de toallitas; retuerza el vértice de la toallita para formar una punta y hágala pasar por el orificio de la tapa del bote. Jale aproximadamente una pulgada hacia afuera. Vuelva a colocar la tapa.*



**2.** Cover the opening half way with one hand. Remove wipe with a uniform pull away from face and eyes. **When not in use, keep lid closed to prevent moisture loss.**

*Cubra la mitad de la abertura con una mano. Retire la toallita de un tirón, en dirección contraria a la cara y a los ojos. Cuando no esté usando las toallitas, mantenga la tapa cerrada para evitar la pérdida de la humedad.*

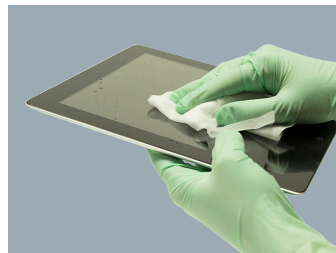

**3.** Gently wipe equipment surface to remove dirt and grime from touch screen.

*Limpie suavemente la superficie del equipo para eliminar la suciedad y la suciedad de la pantalla táctil.*



**4.** Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash, or in accordance with local regulations for infectious waste disposal. Do not flush in toilet.

*No vuelva a utilizar la toallita. Bote a la basura la toallita usada o deséchela de acuerdo con las reglamentaciones locales para la eliminación de residuos infecciosos. No la tire por el inodoro.*

