

# General Guidelines For Use

Instrucciones Generales De Uso

## Sani-Cloth® Bleach

GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE  
Toallitas Germicidas Desechables



Use on hard, nonporous environmental surfaces.  
Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.



1. Remove lid and discard inner seal. Find center of wipe roll, remove first wipe for use, thread next wipe through the hole in the canister lid. Pull through at least one inch. Replace lid. To secure wipe, pull wipe down into small opening.

1. Retire la tapa y deseche el sello interno. Localice el centro del rollo de toallitas, extraiga la primera toallita para su uso, pase la siguiente toallita a través del orificio de la tapa del envase. Tire de ella al menos una pulgada. Reponga la tapa. Para asegurar la toallita, tire de ella hacia abajo en la pequeña abertura.



2a. Cover the opening half way with one hand. Remove wipe(s) with a uniform pull away from face and eyes.  
2b. Dispense single wipes as necessary by pulling out at an angle through the small opening.

2c. Dispense multiple wipes as necessary by pulling vertically through the large opening. Pull down into small opening to tear.

2a. Cubra la mitad de la abertura con una mano. Extraiga las toallas con un tirón uniforme alejado del rostro y los ojos.  
2b. Dispense toallas individualmente según se necesiten tirando de ellas a un ángulo a través de la pequeña abertura.  
2c. Dispense varias toallas según se necesiten tirando de ellas verticalmente a través de la abertura grande. Empújelas hacia la pequeña abertura para rasgarlas.



3a. If present, use a wipe to remove visible soil prior to disinfecting.

3a. Antes de desinfectar, use una toalla para eliminar la suciedad visible si existiera.



3b. Unfold a clean wipe and thoroughly wet surface.

3a. Abra una toalla limpia y humedezca bien con ella la superficie.



4. Allow surface to remain visibly wet for four (4) minutes. Use additional wipe(s) if needed to ensure continuous 4 minute wet contact time. Let air dry.

4. Deje que la superficie permanezca visiblemente húmeda por cuatro (4) minutos. Utilice toallita(s) adicional(es) si es necesario para asegurar un tiempo de contacto húmedo continuo de 4 minutos. Deje secar al aire.



5. Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not flush in toilet.

5. No reutilice la toallita. Deséchela en el basurero. No la deseche en el inodoro.



©2024 PDI UPDATE 0424 PDI05168534  
400 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07677  
800.999.6423 pdihc.com

**PDI**  
BE THE DIFFERENCE