

**Sani-Cloth®**  
GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE  
TOALLITAS GERMICIDAS DESECHABLES

**Prime**

Use on hard, nonporous environmental surfaces.  
Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.



## GENERAL GUIDELINES FOR USE INSTRUCCIONES GENERALES DE USO




**1. Always dispense wipe through lid. Find center of wipe roll, twist corner of wipe into a point and thread through the hole in the canister lid. Pull through about one inch. Replace lid**

Siempre extraiga la toalla a través de la tapa. Busque el centro del rollo de toallas, doble la esquina de la toalla en punta y extráigala a través de la abertura de la tapa del envase. Extraiga aproximadamente una pulgada. Vuelva a colocar la tapa.



**2. Cover the opening half way with one hand. Remove wipe with a uniform pull away from face and eyes. When not in use, keep lid closed to prevent moisture loss.**

Cubra la mitad de la abertura con una mano. Extraiga la toalla con un tirón uniforme, lejos de la cara y los ojos. Cuando no esté usando el producto, mantenga la tapa cerrada para evitar la pérdida de humedad.

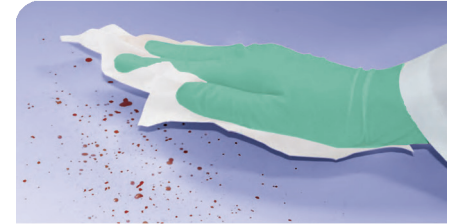

**3a. If present, remove heavy soil loads prior to disinfecting.**

En caso de presencia de mucha suciedad, límpiela antes de desinfectar.



**3b. Unfold a clean wipe and thoroughly wet surface.**

Abra una toalla limpia y humedezca bien con ella la superficie.



**4. Allow treated surface to remain wet for one (1) minute. Let air dry.**

Deje que la superficie tratada permanezca húmeda por un (1) minuto. Deje secar al aire.



**5. Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not flush in toilet.**

No reutilice la toallita. Deséchela en el basurero. No la deseche en el inodoro.

