

Super Sani-Cloth®

GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE

Use on hard, nonporous environmental surfaces.
Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.



GENERAL GUIDELINES FOR USE INSTRUCCIONES GENERALES DE USO



1. Open package lid.
Abra la tapa del paquete.



2. Completely remove inner seal.
Retire por completo el precinto interno.



3. Pull out wipe at angle through opening.
Saque una toalla por el agujero, en diagonal.



4. Snap lid closed after use to retain moisture.
Cierre la tapa a presión después del uso para conservar la humedad.



5a. If present, remove visible soil prior to disinfecting.
En caso de presencia de suciedad, límpiela antes de desinfectar.



5b. Unfold a clean wipe and thoroughly wet surface.
Abra una toalla limpia y humedezca bien con ella la superficie.



6. Allow surface to remain visibly wet for two (2) minutes. Let air dry.
Deje que la superficie permanezca húmeda por dos (2) minutos. Deje que la superficie se seque al aire.



7. Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not flush in toilet.
No reutilice la toallita. Deséchela en el basurero. No la deseche en el inodoro.

Visit pdihc.com for more info.

©2021 PDI02217689
400 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07677
800.999.6423 pdihc.com



INTERVENTIONAL CARE PATIENT CARE ENVIRONMENT OF CARE