

Sani-HyPerCide™

GERMICIDAL SPRAY

Use on hard, nonporous environmental surfaces.
Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.



GENERAL GUIDELINES FOR USE INSTRUCCIONES GENERALES DE USO



1. Hold grip section of bottle under spray nozzle.

Sostenga la sección de agarre de la botella debajo de la boquilla rociadora.



2. Turn nozzle to "ON" setting.
Gire la boquilla hasta el ajuste "ON" (Abierta).



3. If present, remove heavy soil loads prior to disinfecting.

En caso de presencia de mucha suciedad, límpiela antes de desinfectar.



4. Position spray bottle toward untreated surface. Using index finger, squeeze trigger to dispense liquid.

Oriente la botella de aerosol hacia la superficie sin tratar. Con el dedo índice, apriete el gatillo para dispensar el líquido.



5. Spray Sani-HyPerCide™ Germicidal Spray 6-8 inches from surface until thoroughly wet.

Rocíe el Aerosol germicida Sani-HyPerCide a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie hasta que quede bien mojada.



6. Allow surface to remain visibly wet for one (1) minute. For *C. diff* spores, allow surface to remain visibly wet for five (5) minutes. Let air dry or wipe excess liquid using a towel. (Consult your facility's protocol for proper selection of cloth material and disposal of used cloth).

Deje que la superficie permanezca visiblemente mojada por un (1) minuto. Para eliminar las esporas de *C. diff*, deje que la superficie permanezca visiblemente mojada por cinco (5) minutos. Deje secar al aire o limpie con una toalla el exceso de líquido. (Consulte el protocolo de su establecimiento para seleccionar el tipo correcto de material del paño y el método de eliminación del paño usado).



Refer to device manufacturer's instructions for use prior to use

Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo

©2020 PDI PDI01201060
400 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07677
800.999.6423 pdihc.com

PATIENT CARE

INTERVENTIONAL CARE

ENVIRONMENT OF CARE

