

# Sani-HyPerCide™

GERMICIDAL SPRAY

Use on hard, nonporous environmental surfaces.  
Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.



## GENERAL GUIDELINES FOR USE INSTRUCCIONES GENERALES DE USO



**1. Hold grip section of bottle under spray nozzle.**

Sostenga la sección de agarre de la botella debajo de la boquilla rociadora.



**2. Turn nozzle to "ON" setting.**  
Gire la boquilla hasta el ajuste "ON" (Abierta).



**3. If present, remove heavy soil loads prior to disinfecting.**

En caso de presencia de mucha suciedad, límpiela antes de desinfectar.



**4. Position spray bottle toward untreated surface. Using index finger, squeeze trigger to dispense liquid.**

Oriente la botella de aerosol hacia la superficie sin tratar. Con el dedo índice, apriete el gatillo para dispensar el líquido.



**5. Spray Sani-HyPerCide™ Germicidal Spray 6-8 inches from surface until thoroughly wet.**

Rocíe el Aerosol germicida Sani-HyPerCide a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie hasta que quede bien mojada.



**6. Allow surface to remain visibly wet for one (1) minute. For *C. diff* spores, allow surface to remain visibly wet for five (5) minutes. Let air dry or wipe excess liquid using a towel. (Consult your facility's protocol for proper selection of cloth material and disposal of used cloth).**

Deje que la superficie permanezca visiblemente mojada por un (1) minuto. Para eliminar las esporas de *C. diff*, deje que la superficie permanezca visiblemente mojada por cinco (5) minutos. Deje secar al aire o limpie con una toalla el exceso de líquido. (Consulte el protocolo de su establecimiento para seleccionar el tipo correcto de material del paño y el método de eliminación del paño usado).



Refer to device manufacturer's instructions for use prior to use

Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo

©2020 PDI PDI01201060  
400 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07677  
800.999.6423 pdihc.com

PATIENT CARE

INTERVENTIONAL CARE

ENVIRONMENT OF CARE

