

Sani-Cloth® Bleach

GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE
TOALLITAS GERMICIDAS DESECHABLES

Use on hard, nonporous environmental surfaces.
Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.



GENERAL GUIDELINES FOR USE INSTRUCCIONES GENERALES DE USO




1. Always dispense wipe through lid. Find center of wipe roll, twist corner of wipe into a point and thread through the hole in the pail lid. Pull through about one inch. Replace lid.

Siempre extraiga la toalla a través de la tapa. Busque el centro del rollo de toallas, doble la esquina de la toalla en punta y extráigala a través de la abertura de la tapa del envase. Extraiga aproximadamente una pulgada. Vuelva a colocar la tapa.



2. Cover the opening half way with one hand. Remove wipe with a uniform pull away from face and eyes. When not in use, keep lid closed to prevent moisture loss.

Cubra la mitad de la abertura con una mano. Retire la toallita de un tirón, en dirección contraria a la cara y a los ojos. Cuando no este usando las toallitas, mantenga la tapa cerrada para evitar la pérdida de la humedad.

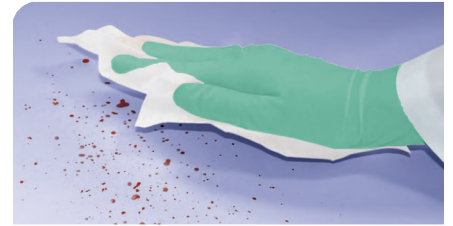

3a. If present, remove heavy soil loads prior to disinfecting.

Si esta presente, retire las cargas pesadas del suelo antes de la desinfección.



3b. Unfold a clean wipe and thoroughly treat surface.

Abra una toalla limpia y humedezca bien con ella la superficie.



4. Treated surface must remain visibly wet for a full four (4) minutes. Use additional wipe(s) if needed to assure continuous 4 minute wet contact time.

La superficie tratada debe permanecer visiblemente húmeda por cuatro (4) minutos completos. Utilice toallas adicionales, si es necesario, para asegurar que permanezca húmeda por 4 minutos continuos.



5. Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not flush in toilet. When refill bag is empty, dispose of the bag in accordance with your facility's regulations for waste disposal and replace with a new fresh bag. If pail is cracked or broken, offer for recycling. If recycling is not available, discard in trash.

No vuelva a usar las toallitas. Deseche las toallitas usadas como basura. No las arroje en el inodoro. Cuando este vacía la bolsa de recarga, deseche de acuerdo con las normas de su centro para la eliminación de desechos y reemplacela por una bolsa nueva. Si el cubo esta agrietado o roto, ofrecer para su reciclaje.

