

Super

Sani-Cloth®

GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE

TOALLITAS GERMICIDAS DESECHABLES

Use on hard, nonporous environmental surfaces.
Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.



GENERAL GUIDELINES FOR USE INSTRUCCIONES GENERALES DE USO




1. Always dispense wipe through lid. Find center of wipe roll, twist corner of wipe into a point and thread through the hole in the canister lid. Pull through about one inch. Replace lid.

Siempre extraiga la toalla a través de la tapa. Busque el centro del rollo de toallas, doble la esquina de la toalla en punta y extráigala a través de la abertura de la tapa del envase. Extraiga aproximadamente una pulgada. Vuelva a colocar la tapa.



2. Cover the opening half way with one hand. Remove wipe with a uniform pull away from face and eyes. When not in use, keep lid closed to prevent moisture loss.

Cubra la mitad de la abertura con una mano. Retire la toallita de un tirón, en dirección contraria a la cara y a los ojos. Cuando no esté usando las toallitas, mantenga la tapa cerrada para evitar la pérdida de la humedad.

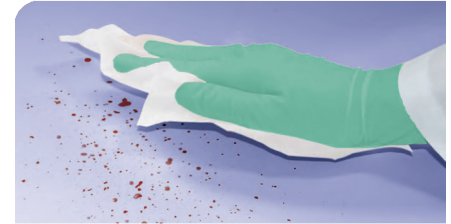

3a. If present, remove heavy soil loads prior to disinfecting.

Si esta presente, retire las cargas pesadas del suelo antes de la desinfección.



3b. Unfold a clean wipe and thoroughly wet surface.

Abra una toalla limpia y humedezca bien con ella la superficie.



4. Allow treated surface to remain wet for two (2) minutes. Let air dry.

Deje que la superficie tratada permanezca húmeda por dos (2) minutos. Deje secar al aire.



5. Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not flush in toilet.

No vuelva a utilizar la toallita. Bote a la basura la toallita usada. No la tire por el inodoro.

