

General Guidelines For Use

Instrucciones Generales De Uso

Sani-Cloth®
GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE

AF3



- 1a. Open package lid.
- 1b. Push the outer rim of the hard plastic down onto the wipe roll and hold firmly.

- 1a. Abra la tapa del paquete.
- 1b. Empuje el borde exterior del plástico rígido hacia abajo sobre el rollo de toallitas y sujételo firmemente.



- 2a. Insert your finger through the pull ring from underneath.
- 2b. Pull the ring away from the lid to remove the inner seal.

- 2a. Inserte el dedo por el aro de tracción desde abajo.
- 2b. Tire del aro alejándolo de la tapa para retirar el sello interior.



- 3a. If the pull ring breaks, push the right side of the oval inner seal inwards.
- 3b. Once the seal is broken, pull to remove the loosened inner seal completely.

- 3a. Si el aro de tracción se rompe, empuje hacia adentro el lado derecho del sello interior ovalado para romperlo.
- 3b. Una vez roto el sello, tire para retirarlo por completo.



- 4a. Align the opening in the lid to center of the wipe roll, remove first wipe for use, then thread next wipe through the hole in the packaging lid.

- 4b. To secure wipe, pull wipe down into small opening.

- 4a. Alinee la abertura en la tapa con el centro del rollo de toallitas, retire la primera toallita para su uso y luego pase la siguiente toallita por el agujero en la tapa del empaque.

- 4b. Para asegurar la toallita, tire de la toallita hacia abajo por la pequeña abertura.



- 5a. Dispense single wipes as necessary by pulling out at an angle through the small opening.

- 5b. Dispense multiple wipes as necessary by pulling vertically through the large opening. Pull down into small opening to tear.

- 5c. Snap lid closed after use to retain moisture.

- 5a. Dispense toallas individualmente según se necesiten tirando de ellas a un ángulo a través de la pequeña abertura.
- 5b. Dispense varias toallas según se necesiten tirando de ellas verticalmente a través de la abertura grande. Empújelas hacia la pequeña abertura para rasgarlas.
- 5c. Cierre la tapa a presión después del uso para conservar la humedad.



- 6a. If present, use a wipe to remove visible soil prior to disinfecting.

- 6b. Unfold a clean wipe and thoroughly wet wet surface.

- 6a. Antes de desinfectar, use una toalla para eliminar la suciedad visible si existiera.
- 6b. Abra una toalla limpia y humedezca bien con ella la superficie.



7. Allow surface to remain visibly wet for three (3) minutes. Use additional wipe(s) if needed to ensure continuous 3 minutes wet contact time. Let air dry.

7. Deje que la superficie permanezca visiblemente húmeda por tres (3) minutos. Utilice toallita(s) adicional(es) si es necesario para asegurar un tiempo de contacto húmedo continuo de 3 minutos. Deje secar al aire.



8. Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not flush in toilet.

8. No reutilice la toallita. Deséchela en el basurero. No la deseche en el inodoro.



Scan for In-Service Video



Use on hard, nonporous environmental surfaces.
Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.

PDI
BE THE DIFFERENCE